




ARMED®
NON PROGREDI, EST REGREDI

Средство реабилитации
инвалидов: кресло-туалет
«Armed»: FS813

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед применением проконсультируйтесь с врачом и подробно ознакомьтесь с настоящим паспортом!

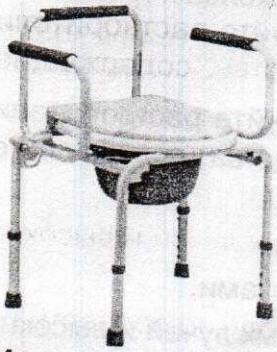

Средство реабилитации инвалидов: кресло-туалет «Armed»: FS813 (далее по паспорту - кресло-туалет) предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пациента или повреждения оборудования, не пренебрегайте рекомендациями данного Паспорта и общими требованиями безопасности.

Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе ограниченных способностей к самообслуживанию.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресло - туалет собирается без использования инструмента.

Сиденье, затем крышка прикрепляются к задней части рамы пластиковыми клипсами.

Санитарная емкость ставится на дугообразные опоры рамы под сиденьем.

Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла-туалета.

Конструкция кресло - туалета позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае санитарная емкость убирается).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры, мм	400 x 560 x 630
Масса нетто/брутто, кг	6/7,5
Грузоподъемность, кг	110
Высота сиденья регулируется через каждые 25 мм	360-460
Глубина сиденья, мм	400
Ширина между поручнями, мм	460

Рама стальная, защищена от коррозии полимерным покрытием, нанесенным методом порошкового напыления.

Стульчак с накладной крышкой и санитарная емкость - съемные, изготовлены из прочного легкомоющегося пластика.

Подлокотники складываются вниз.

Кресло-туалет оснащено резиновыми насадками на ножки. Имеет 5 уровней регулировки высоты. Высота регулируется при помощи надежных кнопочных фиксаторов, расположенных на ножках.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах.

Не допускайте контакта кресло - туалета с электрическими приборами и проводами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед применением убедитесь в целостности сварных швов, затянутости крепёжных винтов, отсутствии сколов и трещин на полимерном покрытии, отсутствии трещин на стульчаке и крышке, исправности кнопок фиксаторов на ножках.

Не реже одного раза в месяц проверяйте исправность и работоспособность кнопок фиксаторов в ножках, для чего очищайте их от загрязнений и смазывайте веретённым маслом (маслом для швейных машинок).

Перед каждым использованием проверяйте стульчак и крышку на отсутствие сколов и трещин.

УХОД

При эксплуатации кресло - туалет требует определенного ухода.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители (ацетон, спирт и т. п.), а также протирочные материалы и чистящие средства, содержащие абразивные материалы.

После санитарной обработки вытрите кресло насухо.

Следует предохранять кресло - туалет от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте кресло - туалет длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

При повреждении резиновых наконечников на ножках кресла-туалета необходимо провести их замену.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|--------|
| 1. Кресло-туалет _____ | 1 шт. |
| 2. Санитарная емкость (ведро с крышкой) _____ | 1 шт. |
| 3. Паспорт _____ | 1 экз. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Средство реабилитации инвалидов: кресло-туалет «Armed»: FS813 соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06753 действительно с 05.05.2010 г. Срок действия: не ограничен

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD,

5 Xingfu Rd., Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan city, China

«Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори, (Лтд.)»,

5 Ксингфу РД, Зона А, индустриальный парк Шишан, район Нанхай, город Фошан, Китай